

# 使用手順

下記のMyotalea®使用時期と使用手順は、推奨される一例ですが、担当歯科医の評価に基づき、治療中いつでも治療に追加が可能です。Myobrace®、Myosa®、またTMJBDS®は、呼吸、口唇、舌位の改善を図る一方、Myotalea®は、筋力と機能に働きかけます。Myotalea®は、筋機能のアクティビティを補助するために設計された装置で、Myobrace®、Myosa®、TMJBDS®と併用する必要があります。

詳細情報は、MRC protocolをご参照頂くか、MRC講習会にご参加ください。

## myobrace®


## myosa®

## TMJBDS®

鼻呼吸の確立



鼻呼吸と舌位の改善を開始

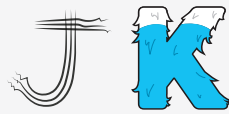


鼻呼吸と舌位の改善を開始



歯列弓の拡大



鼻呼吸と舌位の改善を継続

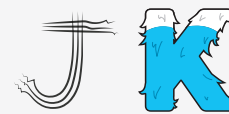

鼻呼吸と舌位の改善を継続



保定



鼻呼吸と舌位の確立



鼻呼吸と舌位の確立



鼻呼吸を確立して、舌の力を改善するために、まずはTLJを使用します。正しい嚙下と口唇閉鎖を可能にするため、また筋機能改善の仕上げとしてLip Trainer™とLip Seal Trainerを使用します。Myobrace® Kシリーズが例として使用されていますが、上記のMyotalea®の使用例は、どのMyobrace®とも併用可能です。

TLJは、鼻呼吸の確立を促し、舌骨上筋群を鍛えて舌の力を改善するために、治療開始時から使用します。Lip Trainer™とLip Seal Trainerは、正しい嚙下と口唇閉鎖を獲得するために、治療2ヶ月目以降に使用します。

TLJは、鼻呼吸を確立し、舌骨上筋群を鍛えて舌の力を改善し、また顎の筋肉をトレーニングするために、治療開始時から使用します。Lip Trainer™、Lip Seal Trainerは、正しい嚙下と口唇閉鎖を獲得するために、治療2ヶ月目以降に使用します。



**AUSTRALIA - HEAD OFFICE**  
Ph: +61 7 5573 5999  
Fax: +61 7 5573 6333  
Toll Free: 1800 074 032  
[australia.hq@myoresearch.com](mailto:australia.hq@myoresearch.com)

**EUROPE**  
Ph: +31 416 651 696  
Fax: +31 416 652 745  
Toll Free: 00 800 6962 7223  
[europa.hq@myoresearch.com](mailto:europa.hq@myoresearch.com)

**JAPAN - 日本総代理店**  
株式会社 オーティカ・インターナショナル  
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-5-4F  
Ph: +81 3 3353 3676  
Fax: +81 3 3353 3830  
[order@orthika.jp](mailto:order@orthika.jp)