

小児用Myosa®

歯列矯正の前に必ず呼吸を是正すべきです。Myosa®プログラムは、Myobrace®治療の前に、機能的な気道の確立、呼吸障害の是正、鼻呼吸の確立に親子が集中して取り組むことを可能にします。

Myosa®治療の適応:

- ・ 慢性的な口呼吸と口唇閉鎖不全
- ・ いびき、その他のBDSの問題(MOE*所見)
- ・ 完全閉塞ではない重度の気道閉塞
- ・ 筋機能矯正評価*(MOE)の呼吸項目が陽性
- ・ ペース(呼吸アクティビティ)で20歩未満
- ・ 親が耳鼻咽喉科の手術やステロイド吸入を拒否

- ① 高い側面 良好な保持力を提供
- ② 呼吸孔 気道を開き口呼吸を調節
- ③ タンタグ 舌を前上方の正しい位置に誘導
- ④ タンエレベーター 舌を正しい位置に保持
- ⑤ エアースプリングベース 顎関節を徐々に除圧し気道を開く
- ⑥ 下顎の前方移動 気道閉塞を軽減



MYOSA® FOR KIDS 装置




MYOSA® FOR KIDS 装置-断面図

主な利点:

- ・ 既製、試適不要
- ・ ソフトで柔らかく、装着感が良い
- ・ 下顎を移動し気道を開いて気流を改善する
- ・ 口呼吸を調節し鼻呼吸を促す
- ・ 正しい舌位の確立を助ける
- ・ エアースプリングベースが気道を開き、顎関節にも優しい

Myosa® FOR JUNIORS 2-6 歳

乳歯列期

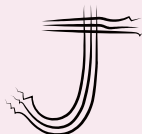

装置(上)
断面図(左)

Myosa® for Juniorsは2歳~6歳児用のSサイズの装置です。

乳歯列期のBDSの原因治療に理想的で、下顎の位置を是正して気道を開き、呼吸を調節し、上顎に舌を挙上することにより効果を発揮します。鼻呼吸が確立してからMyobrace® K1に進みます。

ブルーとピンクの2色があります。

Myosa® FOR KIDS 6-12 歳

混合歯列期



装置(上)
断面図(左)

Myosa® for Kidsは6歳~12歳児用のMサイズの装置です。

混合歯列期のBDSの原因治療に理想的で、下顎の位置を是正して気道を開き、呼吸を調節し、上顎に舌を挙上することにより効果を発揮します。鼻呼吸が確立してからMyobrace® K1に進みます。

ブルーとピンクの2色があります。