


# myobrace®


STRAIGHT TEETH THE NATURAL WAY

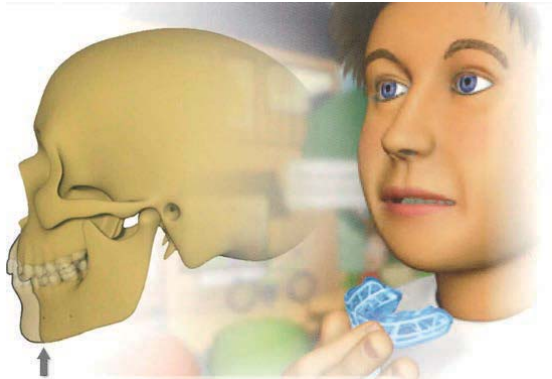

口呼吸は正常な前方への成長を阻害し、前歯や第三大臼歯の萌出スペースを減少させます。

治療目標:

- ・正しい鼻呼吸
- ・口腔顔面筋の正しい機能
- ・正しいアーチフォームと歯の配列

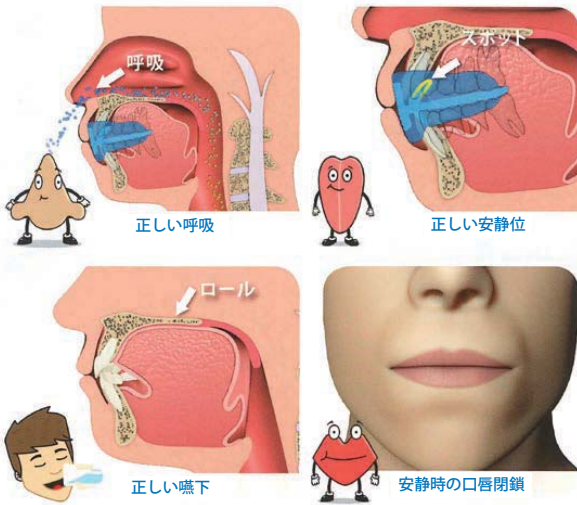

「Myobrace®の役割は不正咬合の原因を治療することである。子どもに鼻から呼吸し、上顎に舌を挙上し、口唇を閉じることを教え、それにより顎の本来の成長を促し、歯が1級の顎関係で整列して萌出するよう舌の十分なスペースを確保することである。」

Dr. Chris Farrell  
(Myofunctional Research Co. CEO and Founder)

More than just straight teeth  
For all ages and malocclusions

- ① Habit Correction 習癖是正
- ② Arch Development アーチ拡大
- ③ Dental Alignment 歯並び
- ④ Retention 保定



## The Myobrace® System

Myofunctional Research Co.(MRC)は呼吸の問題や不正咬合の原因に対処する様々な手段を提供することで、より生物学的な矯正治療のニーズに応えます。

Myobrace®筋機能矯正システムは気道と習癖の改善、歯列の拡大、歯の配列を統合した3歳~15歳向けの包括的治療システムです。

Myobrace®は不正咬合を引起す原因に焦点を当て、歯・顎・顔面の成長に悪影響を与える筋機能習癖の改善を目的とすることで、患者さんにとってより自然な治療法を提供します。

## Myobrace®装置の作用機序

MRCは子どもの成長期に顎の発育を促すため、筋機能習癖を改善する既成装置を開発し続けています。

この装置はブラケットを使用せずに歯を配列し、健康増進効果も併せ持ちます。

この治療の鍵となるのは、正しい鼻呼吸の獲立、安静時の舌位の改善、そして口腔周囲筋を正しく機能させるための訓練です。

習癖の改善と同時にMyobrace®は弱い力を歯に加えることで、通常はブラケットや抜歯を必要とせずに歯を本来の位置に配列します。

**この装置は日中1~2時間と夜間の睡眠中に使用します。**  
治療を成功に導くためには患者さんのコンプライアンスが必要です。各歯列期向けに設計され、各年齢群に適した3~4段階の装置があります。

Myobrace®は舌の効果的な訓練により舌を上顎へ正しく位置付け、口腔周囲筋を訓練し、弱い力で歯列を拡大することで自然な歯並びとなります。正しい舌位と特許取得Dynamicore™の効果により、アーチの発育を促し、歯列弓長と歯の配列を改善します。