


## Myobrace for Kids-Broad

日中1時間と夜間の就寝時に  
使用してください。

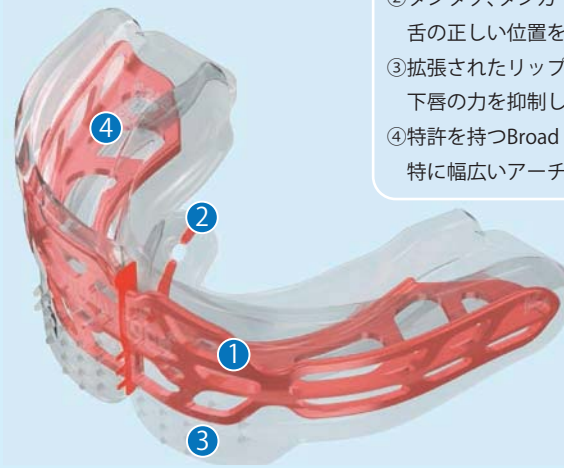

- ①特許を持つ DynamiCore™:  
特にアーチの拡大に適しています。
- ②タンタグ、タンガード、タンエレベーター:  
舌の正しい位置を訓練します。
- ③拡張されたリップバンパー:  
下唇の力を抑制します。
- ④特許を持つ Broad design:  
特に幅広いアーチに適しています。

### Mixed Dentition

Myobrace® for Kids-Broadは、アーチフォームが広い子どもを対象とした3段階のシステムです。この広いアーチフォームは多くのアジアの国々と中央、ラテンアメリカなどによく見られます。

この装置は広がった臼歯部、広い犬歯部、平らな前歯部を特徴とします。最終的に自然なアーチフォームは舌位置に決定されます。KBroad series は呼吸、舌位置、アーチフォームを改善します。

### Designed for broad arch forms with:

- クラスII級1類、2類 不正咬合
- クラスIII級
- 上下顎前歯部叢生
- 過蓋咬合
- 開咬



### Myobrace® K1BROAD

K1Broadは鼻呼吸の獲得と筋機能癖の改善を目的とします。柔軟な材質はコンプライアンスを向上させ、多様なアーチフォームと不正咬合に適応すると同時に夜間の装着も容易にします。K2Broadへの移行はK1Broadが夜間しっかり保持されて、鼻呼吸が獲得されてからです。

### K1BROAD (シリコン)

Medium K1B-M-C



### Myobrace® K2BROAD

K2Broadはアーチの発達を目的とし、癖の改善も継続します。K2Broadの特徴とするDynamicore™は上下顎アーチの発達の手助けをします。これにより正しい舌位置と正しい嚥下をするためのスペースを得られます。同様に、歯列の発達を改善します。K3Broadへの移行はアーチフォームが改善し、安静時の舌位置や正しい嚥下パターンが獲得されてからです。

### K2BROAD (シリコン+ナイロンコア：フランケルケージ)

Medium K2B-M-C



### Myobrace® K3BROAD

K3Broadはポリウレタン製で最終的な歯列、保定、および癖の改善を目的としています。穴の開いたタンタグは舌を直接スポットに触れさせることで最終的な正しい位置の保持を促進します。

### K3BROAD (中硬度ポリウレタン)

Medium K3B-M-C