

Myobrace for Interceptive class III



- ①Dynamiccore™ with Frankel Cage™ :
上顎アーチを発達させ、舌のスペースを作ります。
(No Core タイプにはありません)
- ②小さい通気孔と二層アーチ :
口呼吸を防ぎます。(Class IIIの患者の主な問題)
- ③タンタグ、ガード、エレベータ :
舌の正しい位置を訓練します。これにより、下顎の成長過多を抑制することができます。

※図はi-3 (インコア)

Mixed Dentition

Myobrace Interceptive Class III™はクラスIII級の患者の下顎の発達の問題と口腔習癖を改善することを目的とした3段階のシステムです。

Myobrace Interceptive Class III™は永久歯が生える前(5歳から8歳)が最も効果的です。3つのサイズがあります。

designed for:

- 混合歯列のクラスIIIの不正咬合の治療。
- 鼻呼吸への訓練。
- 舌位置の改善。

i-3[™]



Myobrace® i-3N

i-3Nは習癖を改善します。ある程度のアーチフォームや歯並びでも適応できるように、i-3Nは柔軟なシリコンでできています。その柔軟な性質により、就寝時も外れにくくなっています。i-3Nは3つのサイズがあります。

i-3N (ノーコア：シリコン)

Small	クリア	i-3N-S
Medium	クリア	i-3N-M
Large	クリア	i-3N-L

i-3[™]



Myobrace® i-3[®]

i-3[®]は習癖の改善とアーチの発達を促します。i-3[®]はアーチを発達させ歯列の改善を手助けするDynamiccore™ with Frankel Cageを特徴とします。


i-3[®]は3つのサイズがあります。

i-3 (インコア：シリコン+フランケルケージ)

Small	クリア	i-3-S
Medium	クリア	i-3-M
Large	クリア	i-3-L

P-3[®]

3mmオフセット

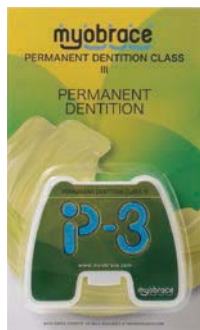

MYOBACE® P-3[®] PERMANENT DENTITION

P-3[®]は骨格性III級の是正が難しい永久歯列用に作られています。P-3[®]は是正可能な歯性III級の前歯部反対咬合を対象としています。

習癖の改善(口呼吸や不正な嚥下パターン)の是正や上下顎前歯部歯列間の3mmのオフセットが歯性III級を改善します。

Myobrace® P-3

P-3は最終的な歯の整列とその保持をします。i-3Hとの違いは3mmのオフセットと中硬度のポリウレタン製になります。

P-3 (中硬度ポリウレタン)

Small	クリア	P-3-S
Medium	クリア	P-3-M
Large	クリア	P-3-L

P-3[®]には3つのサイズがあります。

P-3[®] APPLIANCE- 斜視図(左)

P-3[®] 断面図(上)