

## Lip Trainer™



### Lip + Lip seal Trainer 口輪筋の効果的なトレーニング

Myotalea® Lip Trainer™は、口唇と頬の筋力・筋伸張性・筋緊張を改善すると同時に、嚥下を再トレーニングすることに焦点を当てています。患者さんのアーチフォームに完全に適合し、口腔周囲筋を効果的に鍛えることができます。Myobrace®、Myosa®、TMJBDS®、いずれの治療システムとも併用することができます。

シリコン

Blue	Pink	Clear
<b>LP-B</b>	<b>LP-P</b>	<b>LP-C</b>

## Lip Seal Trainer



### Lip seal Trainer 口輪筋の強化と口唇閉鎖の改善

Myotalea® Lip Seal Trainerは、口輪筋の強化とともに、習慣的な口唇閉鎖の確立を助けます。Myotalea® Lip Trainer™のストラップとして機能するだけでなく、Myotalea® Lip Seal Trainer単体でも、リップシールスパードやトレーニングボードにより、口唇の筋力や口唇閉鎖を改善できます。Myobrace®、Myosa®、TMJBDS®、いずれの治療システムとも併用することができます。

シリコン

Blue	Pink	Yellow	Clear
<b>LST-B</b>	<b>LST-P</b>	<b>LST-Y</b>	<b>LST-C</b>



## Myochew™ Orthodontic Chewing Brush



### myochew™ 矯正用チューイングブラシ


Myochew™は、乳幼児専用設計されており、鼻呼吸を促し、舌や咀嚼筋の機能を向上させることで歯と顎の発育を妨げる問題を効果的に是正するとともに、ブラシが口腔衛生を改善します。Myobrace®、Myosa®、TMJBDS®、いずれの治療システムとも併用することができます。

- ① ブラシ状の突起：歯面のクリーニングに役立ちます。
- ② タンチューブ：舌を強化します。
- ③ エアースプリング：顎の発達を促進します。
- ④ ダブルアーチ：鼻呼吸を促進します。
- ⑤ ティーシングラグ：歯牙萌出時に噛むことができます。
- ⑥ 取り外し可能なストラップ：装置の落下を防ぎます。

使用方法



ステップ1：  
タンチューブを上に向けてMyochew™を持ちます。

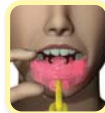

ステップ2：  
Myochew™を口腔内に入れます。



ステップ3：  
口唇を閉じたまま鼻から呼吸をします。



ステップ4：  
舌で繰り返しタンチューブを押し上げます。



ステップ5：  
エアースプリングベースを優しく噛んで押しつぶします。

シリコン

Blue	Pink
<b>MCHEW-B</b>	<b>MCHEW-P</b>