

The Trainer System™


成長期における子供のための口腔習癖と歯並びの改善

The Trainer System™は単一サイズの筋機能と歯並びの改善を組み合わせた装置です。印象や調整の必要がありません。Phase 1 (soft)はある程度の不正咬合に適應できるように柔軟性があります。Phase 2 (hard)は、通常 5~8カ月のソフトタイプの使用後に、より良い歯並びを得るために使います。



- ① トゥースチャネル：前歯を並べます。
- ② タンタグ：正しい舌の位置を訓練します。
- ③ タンガード：舌の突出しを防ぎます。
- ④ リップバンパー：頤筋の運動過多を抑制します。

日中1~2時間と就寝時に使用してください。

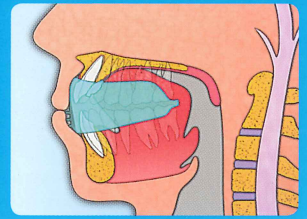


全てのMRC装置は正しい舌の位置の訓練と、口呼吸を防止し、顎をクラスに調整します。

Ages
2 to 5

PRIMARY
DENTITION

infant
TRAINER™

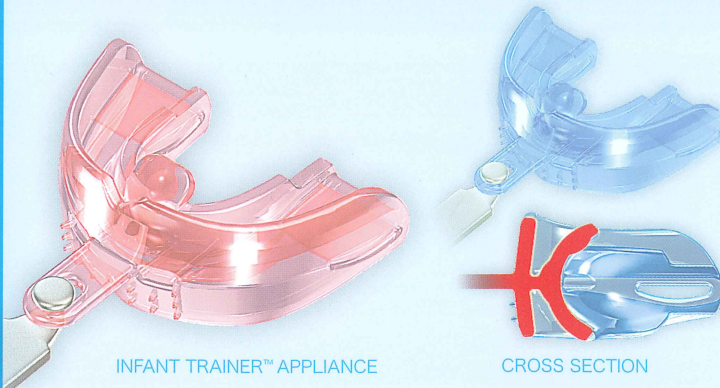

INFANT TRAINER™ APPLIANCE

CROSS SECTION


Infant Trainer™

Infant Trainer™は、乳歯列期の子供に対して正しく咬むことと顎の筋肉を鍛えることを効果的に促す単一サイズの装置です。最も重要なことは、Infant Trainer™が鼻呼吸を促すことと、正しい嚥下と舌の位置を訓練することです。研究報告によると、正しい顔貌、顎および歯列の発達にはこれらの要因が大きく影響をしているのです。

Ages
5 to 8

EARLY MIXED
DENTITION

T4K®

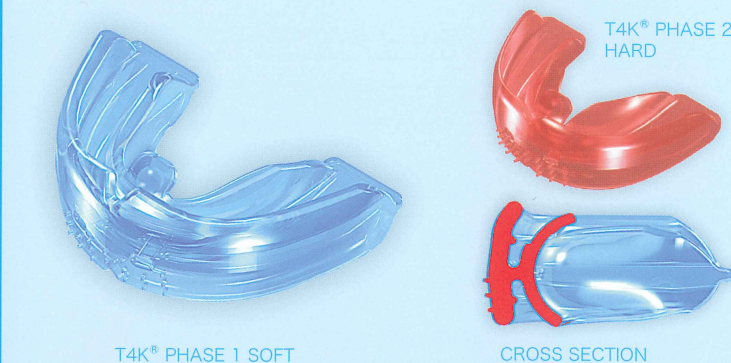

T4K® PHASE 1 SOFT

CROSS SECTION

T4K® PHASE 2
HARD

T4K®


(Pre-Orthodontic Trainer for Kids™)

T4K®は、混合歯列期の初期にとっても有効です。筋機能的設計の特性により不正咬合の原因を改善します。歯と顎が正しい位置になるようデザインされています。上顎に舌を置くことでアーチの発達が促されます。

Ages
8 to 12

PERMANENT
DENTITION
WITH FIXED
ORTHODONTICS

T4B™

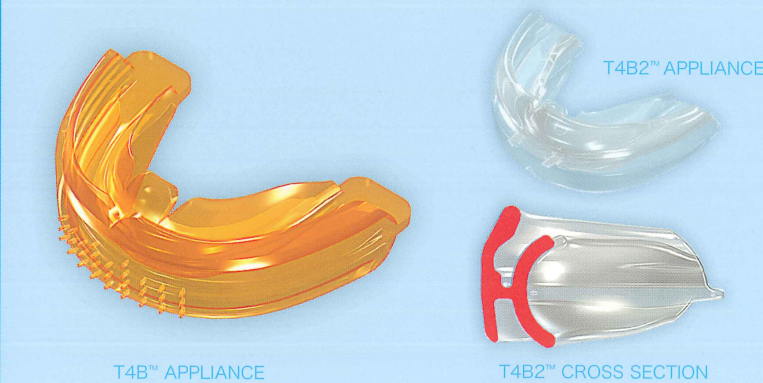

T4B™ APPLIANCE

T4B2™ CROSS SECTION

T4B2™ APPLIANCE

T4B™ (Trainer for Braces™)

T4B™はブラケット治療における快適さと安定性を向上させます。ブラケットによる軟組織の損傷を防ぎ、口腔周囲筋、顎関節の問題を防ぎます。

T4B2™ (Trainer for Braces Class II™)

T4B2™はT4B™より厚く、耐久性があります。より重傷の不正咬合(クラスII)に対応します。高さがある分、装置の保持と口呼吸を改善します

Ages
12 to 15+

PERMANENT
DENTITION

T4A™



T4A™ PHASE 1 SOFT

CROSS SECTION

T4A™ PHASE 2
HARD

T4A™ (Trainer for Alignment™)

T4A™は永久歯列期初期の12~15歳頃の患者に最適です。T4A™は、歯列矯正治療後のリテーナーとしても使用可能です。また、T4A™はちょっとした後戻りのケースにも使用可能です。