



歩行補助杖

歩行補助杖の種類

参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」

多脚杖





サイドウォーカー

ロフトランド杖

C字型

T字型

オフセットL型

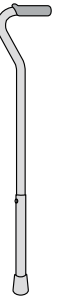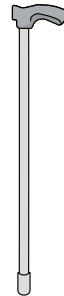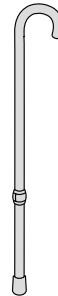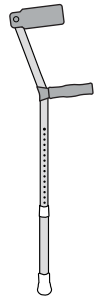

※本カタログには掲載はございません。

介護保険貸与対象

介護保険貸与対象外

杖の役割・使い方

参考元：一般財団法人保健福祉広報協会発行「福祉機器選び方・使い方副読本 基本動作編」



1 免荷

杖に体重を預けることで、足にかかる負担を減らすことができます。

2 バランスの補助

両足+杖を使用することで、体を支える面積が増え、バランスがとりやすくなります。

支持面積

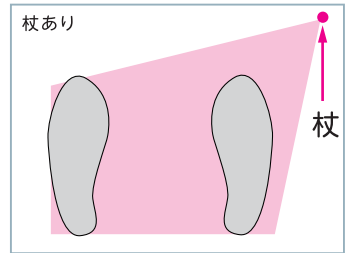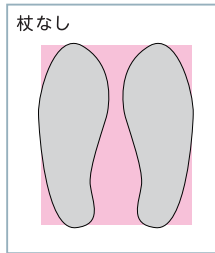

3 歩行のリズム


歩行が不安定になると「イチ」「ニ」「イチ」「ニ」という二拍子のリズムで歩くことが難しくなります。そこで杖を使って、「イチ」「ニ」「サン」の三拍子のリズムでゆっくりと歩くことで、安定した歩行をサポートします。

二拍子のリズム

イチ♪ ニ♪
患側の足 健側の足

三拍子のリズム

イチ♪ ニ♪ サン♪
杖 患側の足 健側の足

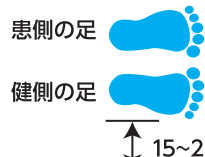

イチ♪ 杖を持ち上げて前に出す


ニ♪ 患側の左足を前に出す

サン♪ 右足を前に出す



力を抜いて自然に立ちます。杖をしっかり握り、地面に対して真下に押し使用します。杖を使用することで足を出すリズムがイチ♪(杖)、ニ♪、サン♪の三拍子になります。

グリップの握り方

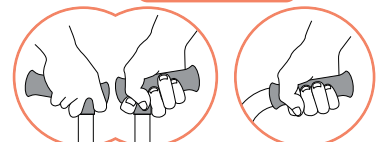

ベッド・
ベッド
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報