

# スロープ

ベッド・  
ベッド  
付属品

床ずれ  
防止用具

## スロープの走行における注意点


降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

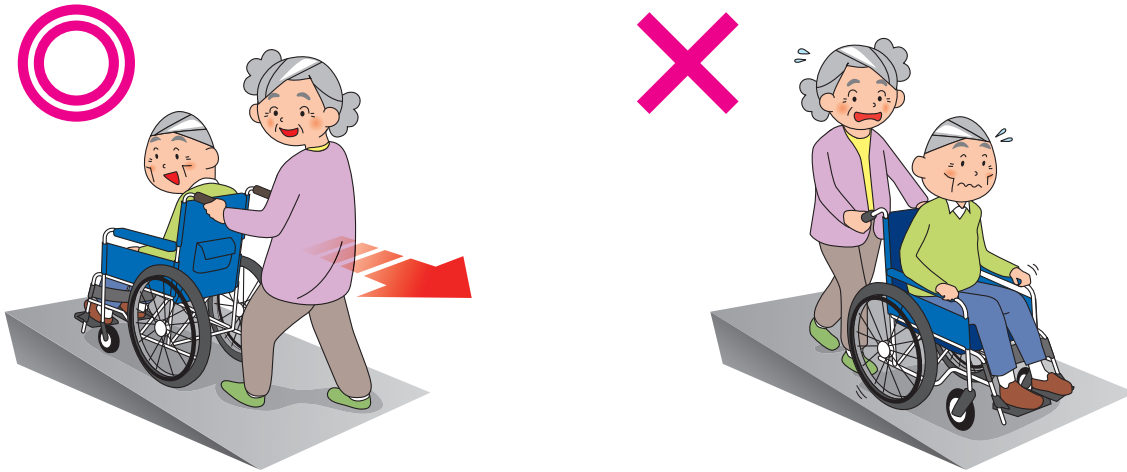

## スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。  
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

歩行器	段差の高さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
	スロープの長さ												
車椅子・ 車椅子 付属品	65cm	OK	OK	OK									
	70cm	OK	OK	OK	OK								
	85cm	OK	OK	OK	OK	OK							
スロープ	87.5cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK						
	100cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK					
	120cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK				
	125cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
	135cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	150cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	165cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	175cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	200cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	205cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
移動用 リフト・ つり具	240cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	245cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	255cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
介護保険 購入 対象品	285cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
販売品		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
情報													

押してくれる人が  
限界の角度



傾斜角度 10~15°未満

自分で進む

誰かが押してくれる

でも5°は  
ぎつい~!



傾斜角度 5°未満



傾斜角度 10°未満

