


## 洗えるウレタンフォームの特徴


通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。

丸洗いOK 乾燥機OK


通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。

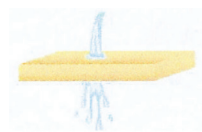

【特殊ウレタンフォーム】  
流水した水がフォームを通過して流れ落ちている。(通過性が良好)

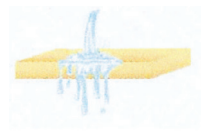

【従来品】  
流水した水はフォームの表面を伝わり、手前に流れ落ちている。

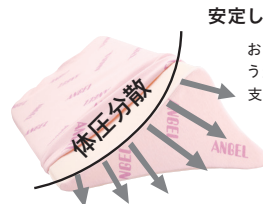

安定したフィット感  
お身体の丸みに添う形状がやさしく支えます。

特許取得済

該当商品 1312-30・1312-40・1312-50・1312-70/ 洗える三角柱クッション

商品ページ P.8

## 通気ビーズの特徴

通気性に優れ、ムレにくく、復元力が高いことでへたりにくい特性のビーズを使用。

丸洗いOK 乾燥機OK

柔らかい素材ですのでソフトな感触をお試しください。  
洗濯・乾燥機の使用も可能で、衛生的にご利用いただけます。  
※クッションの大きさや形状によっては、家庭用洗濯・乾燥機で脱水・乾燥を行うと、洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでご注意ください。



該当商品

1641-40・1641-50・1641-60/ 通気ビーズフリークッション、1624・1626/ 通気ビーズマット、1612・1610/ 通気ビーズパッド、1634・1635・1636/ 通気ビーズフリークッションII、1073/ 通気ビーズスティック、1654/ 通気ビーズ角座II、1652/ 通気ビーズ背中クッションII、1651/ 通気ビーズ車いすクッションII、1693/ 通気ビーズ背中クッション、1625/ 通気ビーズクッション(車いす用)、1661/ ひじ用パッド、1663/ かかと用パッド

商品ページ

P.10・11・14  
P.16・17

## 抗菌ダンロピロクッションの特徴

ピンコア・ラテックス素材を使用したクッションは、通気性や抗菌・防臭効果に優れ大変清潔です。へたりにくく新品同様の心地よさが長続きします。



手洗いOK 抗菌防臭

■通気性バツグン  
空気の通りが良いピンコア・ラテックス素材によりムレません。



■適度な硬さ  
フワッと沈み込み、羽根枕のようにソフトに受け止めます。



【中身の洗濯上の注意】

- 40℃以下のぬるま湯で押し洗いしてください。
- タオルで水分を押し出してから日陰干ししてください。
- 直射日光に干すのは避けてください。
- 洗濯○(手洗い) 脱水× 乾燥機×

該当商品

1051-B・1051-C/ ラテックス体位変換クッション、1050-J/ ラテックス枕型クッション、1056/ ラテックス車いす円背用クッション

商品ページ P.13・17

## 入浴サポートシリーズの特徴

お風呂で便利な沈むクッション。5種類をご用意しました。

メッシュ素材を広範囲に使用。ご使用後の水抜けが早くなりました。

吊下げに便利な設計。

※ご使用の際には、浴槽に沈めて空気を抜いた上でご使用ください。

※側地の表面(立体メッシュ)と中身のビーズにはカビの発生を抑える加工を施してありますが、ボディソープやシャンプーなどが付着したままですとその部分にカビが発生する可能性がありますので、使用後は洗剤等を十分に落としてください。

※クッションの大きさや形状によっては、家庭用洗濯・乾燥機で脱水・乾燥を行うと、洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでご注意ください。

丸洗いOK

乾燥機OK

抗菌

防カビ

該当商品

1126-A・1126-B・1126-C・1126-E・1126-F/ 入浴サポートクッションII

商品ページ P.20・21・70