





より快適な看護・治療のために
利便性・機能性を兼ね備えた商品を
豊富なバリエーションで取り揃えました。

ロック機能のバリエーション

■ プッシュホックで 簡単ロック & オープン

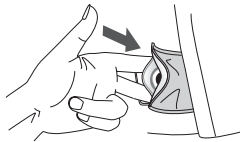

プッシュホックの間に
人差し指と中指を差し込む。

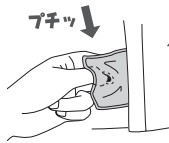


親指のツメで
内側の黒い部分を
垂直に押す。


■ マグネットロックは 楽々開閉

ワンタッチで
開閉可能な
ひまわりオープン。

特許取得済

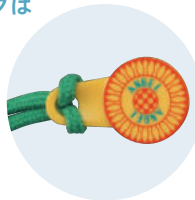

■ ファスナーオープンを使って開閉

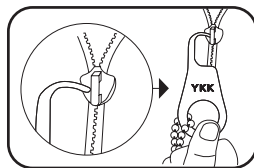

器具の差し込
みによりファス
ナーのロック・
解除をコント
ロール。

部分開閉はとっても便利



部分的に開閉できるの
で医療チューブ等の差
し込みにとっても便利。

豊富なサイズバリエーション

S ~ 4L


S ~ 4L サイズまで
ありますので
体型に合わせて
お選びください。

フルオープンタイプは、寝たまの姿勢で着脱できます

■ 使用方法




1 胸元から足首までのファス
ナーを開きます。

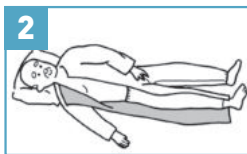


2 右側がすべて開きました。



3 次に股のファスナーを開きます。

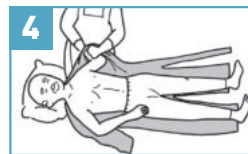

4 最後に両袖を抜きます。

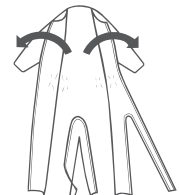

フルオープンした場合

素材の特徴

プッシュホック

プッシュホック

器具を使用せずにロックの開け
閉めが可能です。

抗菌防臭

抗菌防臭加工

ニオイの元である雑菌の繁殖を
抑える加工を施しています。

乾燥機OK

乾燥機が使えます

タンブラー乾燥機に対応してい
ます。

ひまわりオープン

ひまわりオープン

磁力を使ったロックシステム。別添
の器具を使用して開錠ができます。

制菌

制菌

菌の数を減少させる加工を施し
ています。

手洗いOK

手洗いができます

押し洗い等でお手入れをしてくだ
さい。

ファスナーオープン

ファスナーオープン

ファスナーのロック機能をいかし、
別添の器具にて開け閉めをします。

消臭

消臭加工

不快なニオイを軽減する加工を
施しています。

丸洗いOK

丸洗いができます

洗濯機にて簡単に洗うことができ
ます。

部分開閉

部分開閉

開き口が自由に移動できるので、医
療チューブの差し込みに便利です。

オールシーズン

オールシーズン

季節を問わず着用できる中肉素
材を使用しています。