





より快適な看護・治療のために  
利便性・機能性を兼ね備えた商品を  
豊富なバリエーションで取り揃えました。

### ロック機能のバリエーション

#### ■ プッシュホックで 簡単ロック & オープン

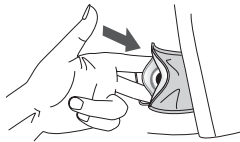

プッシュホックの間に  
人差し指と中指を差し込む。

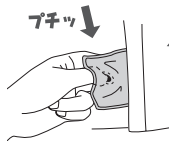


親指のツメで  
内側の黒い部分を  
垂直に押す。


#### ■ マグネットロックは 楽々開閉

ワンタッチで  
開閉可能な  
ひまわりオープン。

特許取得済

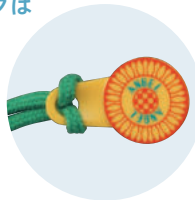

#### ■ ファスナーオープンを使って開閉

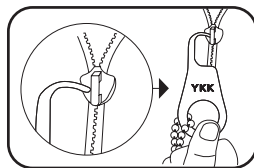

器具の差し込  
みによりファス  
ナーのロック・  
解除をコント  
ロール。

### 部分開閉はとっても便利



部分的に開閉できるの  
で医療チューブ等の差  
し込みにとっても便利。

### 豊富なサイズバリエーション

S ~ 4L


S ~ 4L サイズまで  
ありますので  
体型に合わせて  
お選びください。

### フルオープンタイプは、寝たまの姿勢で着脱できます

#### ■ 使用方法




1 胸元から足首までのファス  
ナーを開きます。

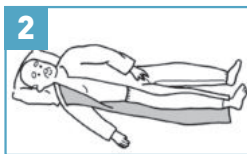


2 右側がすべて開きました。



3 次に股のファスナーを開きます。

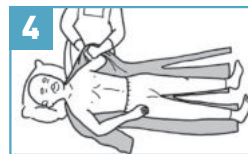

4 最後に両袖を抜きます。

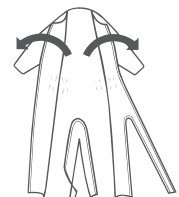

フルオープンした場合

### 素材の特徴

#### プッシュホック

##### プッシュホック

器具を使用せずにロックの開け  
閉めが可能です。

#### 抗菌防臭

##### 抗菌防臭加工

ニオイの元である雑菌の繁殖を  
抑える加工を施しています。

#### 乾燥機 OK

##### 乾燥機が使えます

タンブラー乾燥機に対応してい  
ます。

#### ひまわりオープン

##### ひまわりオープン

磁力を使ったロックシステム。別添  
の器具を使用して開錠ができます。

#### 制菌

##### 制菌

菌の数を減少させる加工を施し  
ています。

#### 手洗い OK

##### 手洗いができます

押し洗い等でお手入れをしてくだ  
さい。

#### ファスナーオープン

##### ファスナーオープン

ファスナーのロック機能をいかし、  
別添の器具にて開け閉めをします。

#### 消臭

##### 消臭加工

不快なニオイを軽減する加工を  
施しています。

#### 丸洗い OK

##### 丸洗いができます

洗濯機にて簡単に洗うことができ  
ます。

#### 部分開閉

##### 部分開閉

開き口が自由に移動できるので、医  
療チューブの差し込みに便利です。

#### オールシーズン

##### オールシーズン

季節を問わず着用できる中肉素  
材を使用しています。